



**Cod.
9985**

SETTORE DENTALE
Via Don L. Sturzo,6 – 42021 Barco (RE) (ITALY)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT 01363800358
Numero REA: 180051 C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
Tel. 0039 (0) 522 875159 Fax 0039 (0) 522 875579
e-mail: reverberisrl@gmail.com

ISTRUZIONI D'USO ED INSTALLAZIONE

VASCA PER DISINFEZIONE SEPTICA



M9078



- Questo simbolo indica che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/CE.
- Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici.
- Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

PREMESSA IMPORTANTE

DISINFEZIONE – STERILIZZAZIONE

SEPTICA è stata studiata per permettere la disinfezione e la sterilizzazione a freddo per immersione a tempo.

DISINFEZIONE

- Si effettua con liquidi normalmente a base di ALCHILAMMINA e composti dell'ammonio quaternario. PRIVI DI ALDEIDI, NON CORROSIVI E NON PERICOLOSI e che non danneggiano l'affilatura degli strumenti taglienti.
- Diluzioni solitamente dal 2 al 10% con tempi di azione che variano da 15/30/60 min.
- Spettro d'azione: VIRUS HIV – HBV – BATTERI, FUNGHI, TUBERCOLICIDI.
- LIQUIDI SMALTIBILI IN AMBIENTE E MOLTO GESTIBILI.

STERILIZZAZIONE A FREDDO

- I liquidi che vengono utilizzati contengono ALDEIDI (Gluteraldeide).
- SOLITAMENTE PRONTI ALL'USO.
- Lo spettro d'azione comprende anche il VIRUS HCV e le SPORE.

I liquidi utilizzati sono da disattivare con prodotti neutralizzanti in dotazione e in un apposito contenitore. NON SONO SMALTIBILI IN AMBIENTE ma seguendo le procedure che regolamentarizzano tali operazioni nel rispetto dell'ambiente.

- PRODOTTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA.

DESTINAZIONE D'USO

SEPTICA È UNA APPARECCHIATURA PER LA DISINFEZIONE E LA STERILIZZAZIONE A FREDDO CON LIQUIDO AD IMMERSIONE DI STRUMENTARIO MEDICO E NON.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE D'INGOMBRO 400x240x200h

MISURE VASCA 330x140x150h

PESO 2Kg.

NESSUNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

TUTTE LE PARTI CHE COMPONGONO SEPTICA SONO AZIONATE MECCANICAMENTE.

La parte esterna di SEPTICA è in materiale plastico contenente la vasca in acciaio inox ed è completa di CESTELLO PORTASTRUMENTI INOX, COPERCHIO IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La disinfezione permette l'abbattimento della carica batterica sullo strumentario proteggendo l'operatore nelle successive fasi di manipolazione.

Gli strumenti devono essere necessariamente in acciaio inox, plastica o gomma. Da non inserire in bagno strumenti in alluminio o strumenti che presentano parti ferrose scoperte né tantomeno strumentario cromato galvanicamente.

La disinfezione deve essere applicata seguendo una procedura corretta riferita ai modi e ai tempi di immersione. E' necessario perciò attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate sulle confezioni del prodotto utilizzato.

La vasca di disinfezione SEPTICA è di facile utilizzo grazie al cestello in acciaio inox con maniglie snodate che permettono sia l'immersione che il drenaggio dei materiali a fine ciclo.

SEPTICA è dotata di una vasca in acciaio inox per cariche di media portata per risolvere le esigenze di vari settori dove può essere utilizzata (ODONTOIATRIA, MEDICINA GENERALE, ESTETICA, PODOLOGIA, PARRUCCHIERI, MANICURE).

SEPTICA è dotata di un TIMER con suoneria di fine ciclo per rispettare i precisi tempi di reazione del liquido.

MODALITA' D'USO

Per prima cosa procedere alla diluzione in acqua del liquido utilizzato seguendo le percentuali indicate sulla confezione del liquido stesso.

Versare nella vasca una quantità di SOLUZIONE DISINFETTANTE tale da coprire completamente lo strumentario da trattare. Non riempire la vasca con quantità superiori in quanto inutile.

Posizionare lo strumentario nel cestello inox.

Mettere le maniglie snodate in posizione A (Fig. 1 Pag. 6) e posizionare il cestello a fondo vasca.

Ruotare in senso orario la Manopola del TIMER B sino al raggiungimento del tempo desiderato riportato sulle istruzioni del liquido utilizzato.

Coprire la vasca col coperchio in plastica per evitare la fuoriuscita di odori.

Quando il TIMER ci avvisa acusticamente che il tempo di immersione preimpostato è trascorso, estrarre il cestello dal fondo e metterlo in fase di scolatura tramite le maniglie snodate in posizione C (Fig. 2 Pag. 6) per un tempo di circa 3 min.

Togliere lo strumentario dal cestello, rimettere il cestello vuoto in posizione C e rimettere il coperchio.

MANUTENZIONE


Quando viene ritenuto necessario, pulire la vasca o il cestello con un prodotto specifico per acciaio inox servendosi di una spugna.


Per le parti in plastica è sufficiente un detergente neutro. NON usare in alcun caso detersivi abrasivi.

SICUREZZA

Collocare SEPTICA su un piano stabile, lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Per qualsiasi inconveniente dovuto all'utilizzazione dei liquidi consultare le istruzioni degli stessi.

COMPONENTI

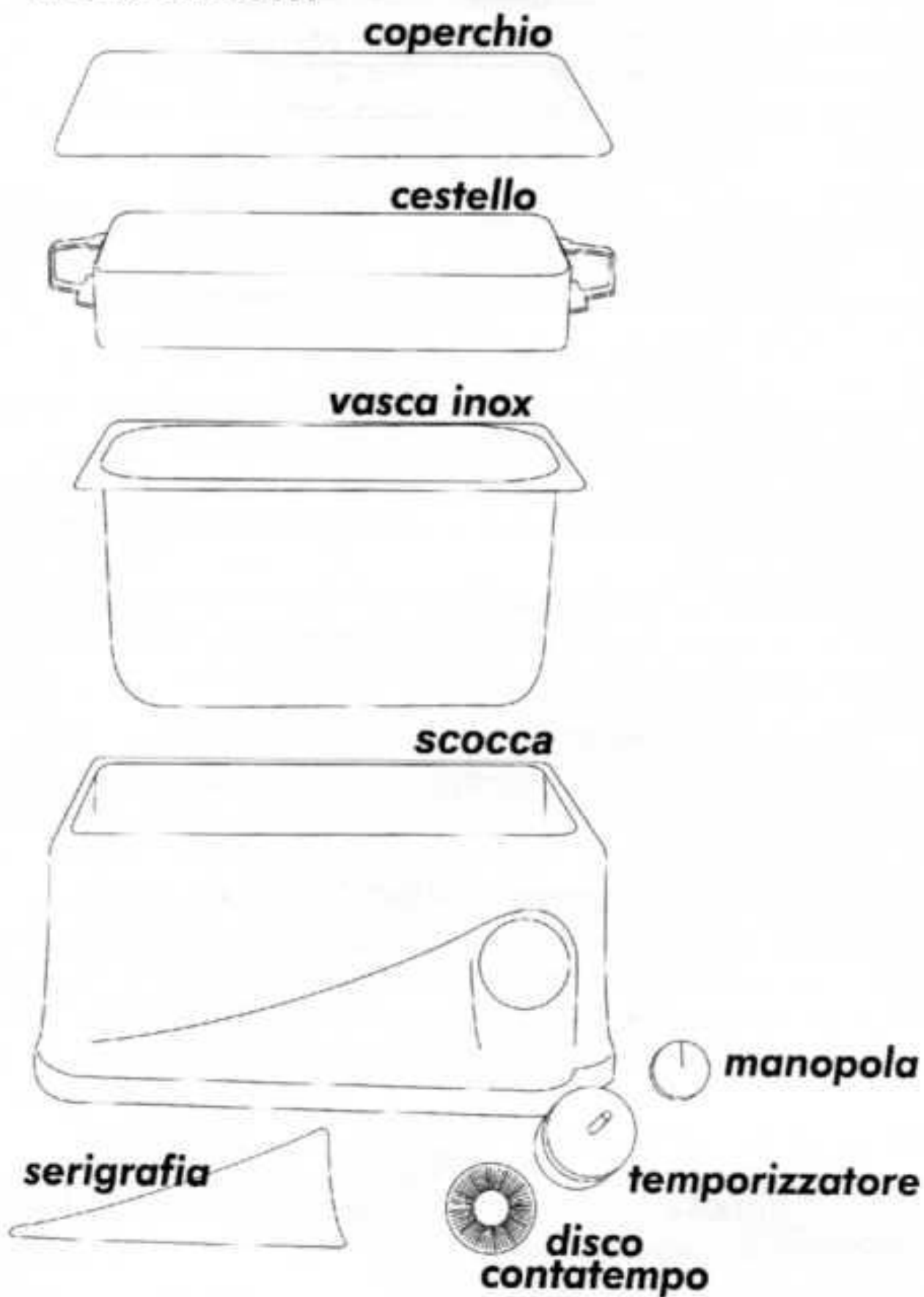

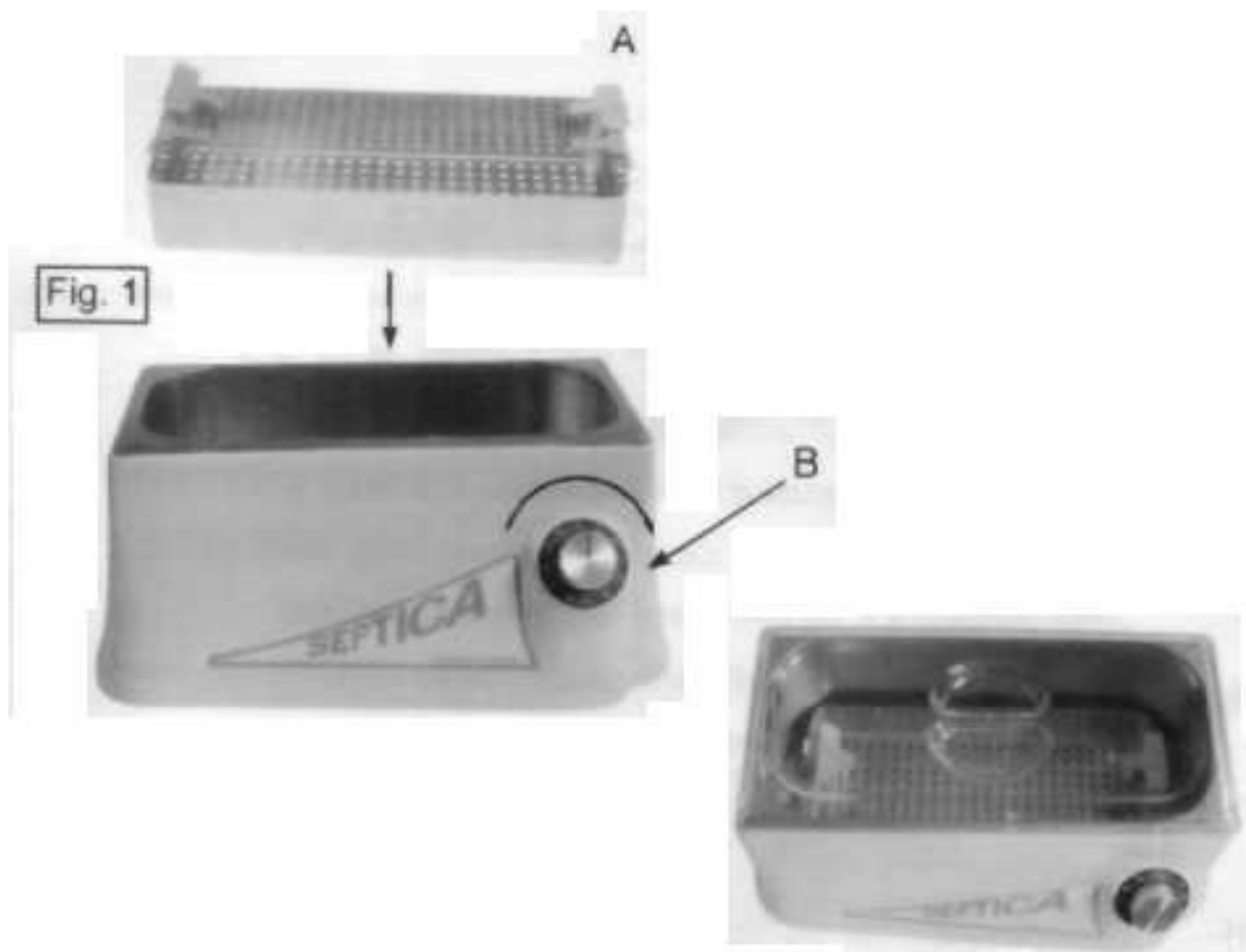

GARANZIA

- 1) Il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 24 mesi.
- 2) La garanzia ha inizio dalla data di consegna all'utilizzatore, comprovata dalla restituzione del tagliando allegato.
- 3) La riparazione o la sostituzione di un particolare sarà ad insindacabile giudizio della Reverberi
- 4) Sono esclusi dalla garanzia i danni derivati da una cattiva manutenzione, imperizie o cause varie non imputabili a Reverberi
- 5) La garanzia non comporta alcun risarcimento danni diretti o indiretti verso persone o cose dovuti alla negligenza nell'utilizzo.
- 6) Reverberi non risponde di danni causati dal prodotto qualora venga accertata una cattiva manutenzione dello stesso Reverberi
- 7) La garanzia decade automaticamente qualora l'apparecchio venga manomesso o riparato da terzi senza l'autorizzazione di Reverberi
- 8) I componenti da sostituire in garanzia devono essere resi a in porto franco.
- 9) La mancata restituzione comporta l'addebito del particolare sostituito.
- 10) Reverberi non accetta rientri da utilizzatori finali, ma gestiti dal rivenditore scelto dall'utilizzatore in conformità alle procedure commerciali.
- 11) Nel caso di sostituzione completa dell'apparecchiatura essa dovrà pervenire in Reverberi porto franco e adeguatamente imballata (si consiglia di utilizzare l'imballo originale).



Via Don L. Sturzo,6 – 42021 Bibbiano (RE) (ITALY)
Codice Fiscale e Partita IVA: IT 01363800358
Numero REA: 180051 C.C.I.A.A. di Reggio Emilia
Tel. 0039 (0) 522 875159 Fax 0039 (0) 522 875579
e-mail: reverberisrl@gmail.com